

INCIDIN® WIPES - DRY WIPES SYSTEM

Incidin® Premium Wipes/Incidin® Wipes Dispenser

Zur professionellen Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art

Das Incidin® Dry Wipes System besteht aus dem universell einsetzbaren Vliestuchspender und den besonders hochwertigen Vliestüchern Incidin® Premium Wipes.

Incidin® Wipes sind in Kombination mit den Ecolab Flächendesinfektionsmitteln (z. B. Incidin® Pro) für eine möglichst einfache und anwenderfreundliche Handhabung der Oberflächendesinfektion konzipiert.

- ▲ Incidin® Wipes Dispenser
 - Wiederverschließbar und absolut dicht
 - Beständig gegenüber Ecolab Desinfektionsmitteln
 - Deckelverschluss austauschbar und in 4 Farben erhältlich
- ▲ Incidin® Premium Wipes
 - Besonders hochwertige Vliestücher fusselfrei und problemlos zu entnehmen.
 - 99 Tücher / Rolle, 20 x 38 cm, 60 g/m²




Incidin® Wipes - Dry Wipes System

Zur professionellen Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art

Incidin® Wipes - auf die Fläche, fertig - los!

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
Im Labor analytisch/mikrobiologisch abgetestet und abgestimmt auf Incidin® Pro, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid, Incidin® Liquid und Incidin® Foam.	Das Optimum in punkto Sicherheit und Anwendung in Kombination mit den bewährten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln.
Einfachste Befüllung mittels der bewährten Ecolab Dosiertechnik (DG1/DG3) oder manuell angesetzter Anwendungslösung möglich. Der Vliestuchspender ist besonders hochwertig, spülmaschinenfest und beständig gegenüber den Ecolab Desinfektionsmitteln.	Das Incidin® Wipes System fügt sich perfekt in bestehende Systeme zur Flächendesinfektion mit Incidin® Pro, Incidin® Extra N, Incidin® Rapid, Incidin® Liquid und Incidin® Foam sowie die marktführende Dosiertechnik DG1/DG3 Geräte ein.
Die Deckelverschlüsse sind in den Farben grün (Standard) gelb, blau und rot (alle optional) erhältlich. Darüber hinaus können die Verschlüsse separat getauscht werden.	Mittels Farbkodierung kann eindeutig sowohl zwischen den unterschiedlichen Desinfektionsmitteln als auch Anwendungsbereichen getrennt werden. Bei abgebrochenem Verschluss muss nicht der ganze Deckel oder Eimer ersetzt werden, sondern lediglich der Verschluss.
Produktlösungen mit Incidin® Pro, Incidin® Extra N und Incidin® Rapid können in den bewährten Konzentrationen angewendet werden. Incidin® Liquid und Incidin® Foam sind stets pur zur Befüllung zu verwenden.	Mit dem Einsatz der Incidin® Wipes steht ein anwenderfreundliches und flexibles System aus bewährten Produkten in neuer Applikationsform zur Verfügung.

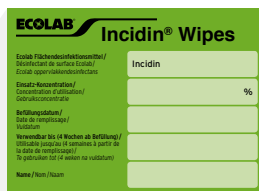


Für jede Wieder- / Befüllung mit den Vliestuchrollen sind zusätzlich Original Sicherheitsetiketten für die entsprechende Kennzeichnung (Produkt, Befülldatum, etc.) des Vliestuchspenders in der Verpackung enthalten.


ANWENDUNGSHINWEISE & EMPFEHLUNGEN




1 Handschuhe anziehen und Deckel abnehmen. Vliestuchspender vor der Wiederbefüllung mit Desinfektionslösung auswaschen und ggfls. säubern.

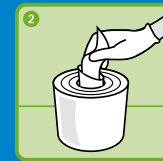

2 Die Vliestuchrolle mit Handschuhen aus der Verpackung entnehmen und aus der Mitte der Rolle ein erstes Tuch herausziehen.

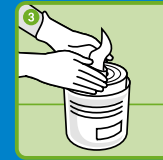


3 Die Rolle Incidin® Premium Wipes mittig in den Vliestuchspender einsetzen.

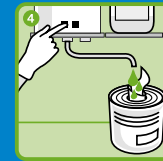

4 Incidin® Flächendesinfektionsmittellösung einfüllen: Incidin® Plus, Incidin® Pro, Incidin® Extra N und Incidin® Rapid in gewünschter Anwendungskonzentration befüllen, Incidin® Liquid und Incidin® Foam pur befüllen. Mind. 2,5 l Lösung verwenden.



5 Erstes Tuch durch die Deckelöffnung führen und den Eimer mit dem Deckel verschließen. Nach Einfüllen der Lösung 30 - 60 Min. warten, sodass alle Tücher optimal durchtränkt sind.

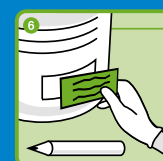

6 Nach dem Befüllvorgang das neue Sicherheitsetikett entsprechend beschriften und aufkleben. Die getränkten Tücher können 28 Tage verwendet werden.

BESTELLINFORMATIONEN

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
Incidin® Wipes Dispenser	1 Stück im Karton	100 10 283
Incidin® Premium Wipes	6 Rollen á 99 Tücher/Karton	100 10 279

Neben den Ecolab Flächendesinfektionsmitteln können Incidin® Wipes auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Bitte beachten Sie die Anwendungsempfehlungen des jeweiligen Herstellers.

WORLDWIDE HEADQUARTERS

370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

REGIONAL OFFICE

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Phone +49 (0)2173-599-1900
www.ecolabhealthcare.de