

mobilomed Wipes

Vliestuchspender

- zur Tränkung mit allen Flächendesinfektionsmitteln
- wiederbefüllbares Spendersystem
- gute Abgabe des Wirkstoffes auf die Fläche
- sehr wirtschaftlich



Produktbeschreibung

mobilomed Wipes sind trockene Wischtücher zur Tränkung mit Desinfektionsmitteln zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten. Die Tücher bestehen aus hochwertigem, fusselfreiem Vliesstoff. Sie können sowohl in Kombination mit gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionsmitteln als auch mit der gebrauchsfertigen Anwendungslösung von Desinfektionsmittelkonzentraten verwendet werden. **mobilomed Wipes** wurden speziell für die Flächendesinfektion entwickelt. Sie geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine einwandfreie Benetzung der zu desinfizierenden Fläche. **mobilomed Wipes** können aus einem eigens dafür konzipierten **mobilomed Wipes** Vliestuchspender entnommen werden. Die Anwendungslösung wird durch das geschlossene System vor externer Kontamination und Verdunstung geschützt. Der Vliestuchspender besteht aus Polyethylen und Polypropylen und ist bis 60°C spülmaschinenfest. Ein spezielles Etikett, welches die Dokumentation von Charge, Ansatz- und Verfalldatum erleichtert, ist jeder **mobilomed Wipes** Rolle beigefügt.

Anwendungsgebiete

Zur Flächendesinfektion in allen Bereichen von medizinischen Einrichtungen.

Sie sind besonders geeignet für:

- patientennahe Flächen (Nachtische, Betten und Patientenliegen)
- schwer zugängliche Flächen

Anwendung

Gebrauchsfertige Anwendungslösung des gewünschten Desinfektionsmittels herstellen (Anwendungskonzentrationen und Einwirkzeit den Herstellerangaben entnehmen). Anschließend erfolgt die Tränkung der Tücher im Spendereimer mit 1,5 - 2 Litern der Gebrauchslösung des Desinfektionsmittelkonzentrats oder des gebrauchsfertigen alkoholischen Desinfektionsmittels. Es dauert 30-60 Minuten bis alle Tücher vollständig getränkt sind.

Flächen und Gegenstände sorgfältig bei vollständiger Benetzung abwischen. Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten! Neben **mobilomed** Produkten können **mobilomed Wipes** auch mit Produkten anderer Hersteller kombiniert werden. Bitte auch Herstellerangaben zur Stabilität der Flächendesinfektionsmittel beachten. Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln (Ausnahme: Peressigsäure-haltige Produkte oder Produkte auf Basis von Sauerstoffabspaltenden Wirkstoffen) können die Tücher nach Tränkung über einen Zeitraum von 28 Tagen verwendet werden. **Mobilomed Wipes** sind einzeln abreibbar. Nachfolgende Tücher sind durch die große Auffangschale mit Deckel des Spendersystems sicher geschützt.

Zusammensetzung

1 Rolle besteht aus 90 Wischtüchern à 32 cm x 30 cm, trocken, aus hochwertigem, fusselfreiem Vlies. 100% Kunstfaser.

Lieferformen

Einzelverpackung

Mobilomed Wipes
Rolle à 90 Blatt, 6 x 1 Rolle

Art.-Nr

11393

Wandhalter
1 x 1 Wandhalter

139382