



Gebrauchsfertig getränkte Tücher zur Desinfektion von Flächen / PT2

perform® classic wipes IPA

Unser Plus

- schnell, effektiv, rückstandsfrei
- mit DI Wasser
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Anwendungsgebiete

Desinfektion von sauberen nicht porösen Oberflächen wie kleine Arbeitsflächen in medizinischen und nicht medizinischen Bereichen.

Anwendungshinweise

Die Oberfläche vor Anwendung sorgfältig reinigen. Überschüssiges Wasser gegebenenfalls vor der Desinfektion von der Oberfläche entfernen. Auf vollständige Benetzung achten. Benutzte Tücher müssen im verschlossenen Behälter entsorgt werden. Desinfizieren Sie nach jeder Produktion und jedem Reinigungsprozess oder sofern es gemäß SOP erforderlich ist. Die Fläche gründlich mit einem Tuch wischen und bei Raumtemperatur ($20 \pm 2^\circ\text{C}$) mind. 5 Min. einwirken lassen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN16615 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
bakterizid EN1276 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
levurozid EN16615 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
levurozid EN1650 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.



perform[®] classic wipes IPA

Produktdaten

Ein Softpack enthält: 114 gebrauchsfertig getränkte Tücher.
100 g enthalten: 63,1 g Propan-2-ol (entspricht 70 % (v/v))

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,88 g/cm ³ / 20 °C / der Wirkstofflösung
Farbe	farblos
Flammpunkt	22 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 / der Wirkstofflösung
Form	Wässrig-alkoholische Lösung auf Vliesstoff
pH	Nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch	> 2,5 mPa*s / 20 °C / Rohstoff

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur für industrielle/ berufsmäßige Anwender.

Der in perform[®] classic wipes IPA enthaltene Alkohol entspricht der pharmazeutischen Qualität gemäß Ph. Eur.
EU-0023656-0002 1-2

Verwandte Produkte

- perform[®] classic alcohol IPA
- perform[®] sterile alcohol IPA
- perform[®] sterile alcohol IPA (WFI)

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10003



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com