



## terralin® liquid

Aldehydfreies Schnell-Desinfektionspräparat auf Basis von Alkoholen.

### Unser Plus:

- aldehydfrei
- gebrauchsfertig
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- schnelle, fleckenfreie Abtrocknung

### Anwendungsgebiete

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte [CE 0297] in allen Krankenhausbereichen mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z. B.:

- Patientenbehandlungseinheiten mit angrenzenden Flächen
- Untersuchungsliegen
- OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen
- Oberflächen medizinischer Geräte

### Anwendungshinweise

terralin® liquid ist eine gebrauchsfertige Lösung. terralin® liquid unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Ggf. überschüssige Präparatmengen mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

terralin® liquid wirkt gegen:

- Bakterien (inkl. Tb) • Pilze • Hepatitis-B-Viren • HIV • HCV
- Adeno-Viren • Rota-Viren • Papova-Viren • Polio-Viren

### Einwirkzeiten

Wirksamkeiten	Einwirkzeit
Bakterien, Pilze (C. albicans) (gemäß DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten)	1 Min.
MRSA Multiresistente Staphylococcus aureus-Stämme	1 Min.
Tb	1 Min.
viruzid*	30 Min.
begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV und HCV)	30 Sek.
Noro-Virus**	1 Min.
Adeno-Viren (Typ 2)	2 Min.
Papova SV 40	15 Min.
Polio-Viren	30 Min.
Rota-Viren	30 Sek.
Vaccinia	30 Sek.
DGHM-Liste / Zertifikat Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis	5 Min.

\* gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01/2004

\*\* geprüft mit neuem Prüfvirus: Murines Noro-Virus (in Anlehnung an die EN 14 476:2007)

# terralin® liquid

## Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:  
25 g Ethanol (94 %ig), 35 g 1-Propanol

### Chemisch-physikalische Daten

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit  
Dichte (20 °C): ca. 0,90 g/cm<sup>3</sup>  
Flammpunkt: 27 °C (DIN 51 755)

## Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- Xi:** Reizend.  
**R10:** Entzündlich.  
**R41:** Gefahr ernster Augenschäden.  
**R67:** Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
**S2:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
**S23:** Aerosol nicht einatmen.  
**S26:** Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
**S35:** Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.  
**S39:** Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.  
**S51:** Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

## Besondere Hinweise

terralin® liquid ist äußerst materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen (außer Acrylglas und alkoholempfindlichen Lacken). Bitte beachten Sie den Brand- und Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR-Regel „Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsdienst“. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen.

## Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
1 l-Flasche	10 x 1 l	102 001
10 l-Kanister	1 x 10 l	102 004

## Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
schülke Sprühpumpe 500 ml/1 l	180 124
10 l-Kanisterhahn	135 501
10 l-Kanisterdosierer (20 ml/Hub)	117 101
10 l-Kanisterschlüssel	135 810
Umfülltrichter	117 901
Druckluftspritze	120 001

Für ausführliche Informationen zu unseren Dosiergeräten fordern Sie bitte die Gesamtübersicht „Hygiene-Technik“ an.

## Umweltinformationen

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Informationen

Einen Überblick zu unserem Präparat terralin® liquid finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Für Ihre individuellen Fragen:  
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).



Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44  
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0  
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)